



## 1.1. Reinigen van de Automatische Snelspankoppeling

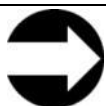

Het reinigen wordt wekelijks aangeraden.

Reserveer een vaste datum aan het einde van de werkweek voor het reinigen van het handstuk. Dit vergt niet veel tijd, maar voorziet u en uw cliënten van veiligheid en onderhoud dit belangrijke onderdeel.

If you notice after some cleaning intervals, that only a small amount of abrasive dust is present in the hand piece, you may extend the cleaning intervals.

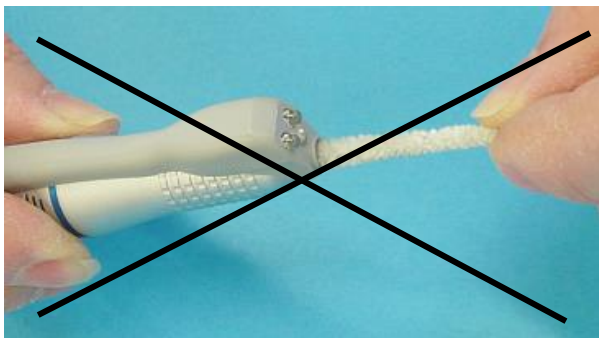

**Belangrijk:**  
**Breng geen pijpreiniger (of andere instrumenten) in de fraisopening.**

Smeer het handstuk niet met olie of vet.

Beide leiden tot defecten en dure reparaties.



**Ontkoppel het netsnoer!**

Deze reinigingsprocedure mag alleen worden uitgevoerd met een ontkoppeld netsnoer.




1  
Draai de schroef uit de sprayleiding. Een passende inbus sleutel bevindt zich in de onderhoudsset van uw apparaat.



2  
Druk voorzichtig de sprayleiding van het handstuk (voorwaarts). Zorg dat de interne leidingen en de kabel niet beschadigen.



3  
Schroef het handstuk van de micromotor. Zorg dat de grijze kunststof meenemer (a) op de micromotor gemonteerd zit.

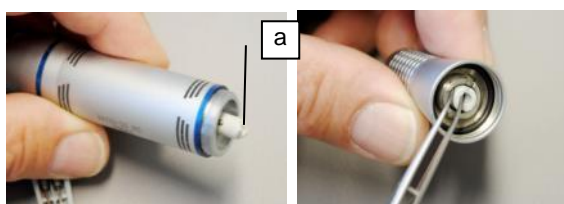

Als de meenemer in het handstuk blijft zitten, verwijder deze met een pincet en monteer deze op de micromotor, platte zijde eerst.


**Opmerking:** Start de motor niet wanneer alleen de meenemer, maar niet het handstuk is gemonteerd.



4 Ontschroef de borgmoer d.m.v. een 10-cent munt




5 Verwijder de klemkamer. Wanneer de klemkamer niet uit zichzelf uit de behuizing glijdt, kunt u de testfrais in het handstuk aanbrengen en deze gebruiken om de klemkamer eruit te drukken.

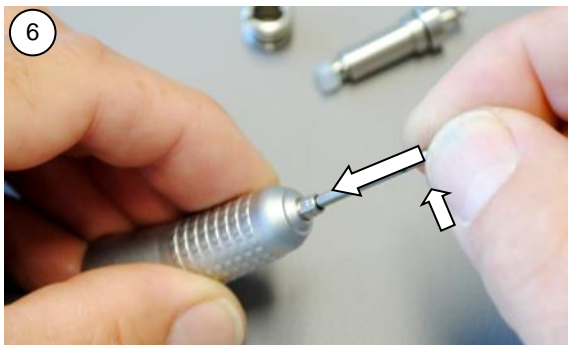

6 Druk nu het lager en de schacht uit de handstukbehuizing. Om dit te doen, steek de testfrais, onder een lichte hoek, in het handstuk totdat deze tegen de voorste rand van de schacht aandrukt, en druk de schacht naar buiten.



7 Trek het voorste lager van de schacht.

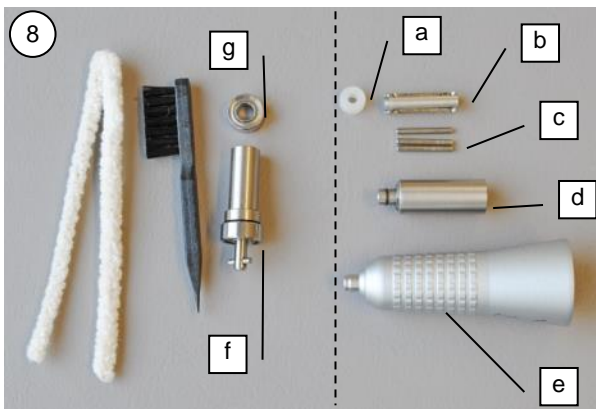

8 Reiniging van de individuele onderdelen:  
Demonteer het spannings apparaaten reinig de individuele onderdelen grondig d.m.v. een borstel en pijp reiniger.


Onderdelen (a) tot (e) rechts van de illustratie kunnen additioneel gereinigd worden in de ultrasoon.

**Belangrijk:** de klemkamer (f) en het voorste lager (g) mogen niet worden gereinigd in de ultrasoon, dit beschadigt de lagers.

De onderdelen moeten complete opgedroogd zijn voor montage.



Monteer nu de gereinigde en opgedroogde onderdelen, druk de siliconen spanring (a) op de corresponderende pinnen op de spanbett (b). Breng nu de 3 spanstiften aan (c) en de druk de gemonteerde onderdelen in de klemkamer (f).

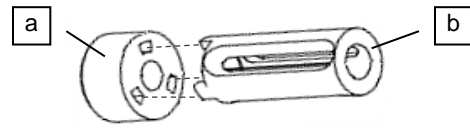

**Tip:** Bij deze handeling, sluit de spanbett af met 3 vingers, dit voorkomt dat de spanstiften eruit vallen.



Druk de gemonteerde klemkamer in de schacht.



Druk het voorste lager op de schacht.



Druk de Schacht met de klemkamer in de handstukbehuizing.



Draai de borgmoer in de handstukbehuizing.



14 Controleer of de meenemer op de micromotor zit (zie stap 3) en schroef het handstuk op de micromotor.




15 Bij het monteren van de sprayleiding, controleer of de kabel in een Z-vorm ligt tussen de 2 leidingen.




16 Druk de sprayleiding op de punt van het handstuk en druk vervolgens de sprayleiding op de blauwe klemring in een gecentreerde positie.



Zorg dat de sprayleiding in een rechte lijn is gemonteerd en niet is verbogen.

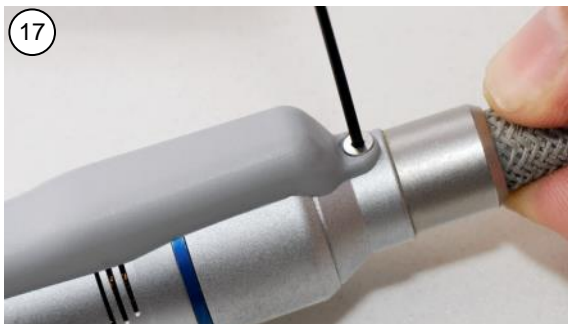

17 Draai de schroef van de sprayleiding weer vast.

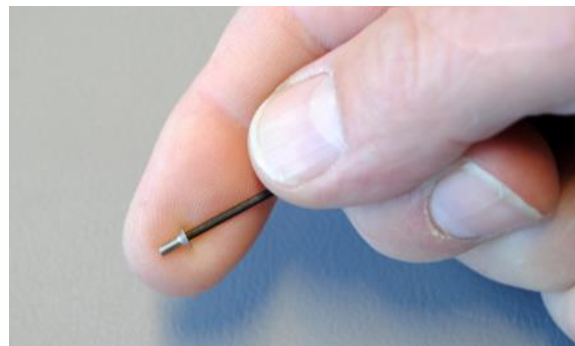

**Tip:** Houdt de schroef als weergegeven. Dit maakt het eenvoudiger de schroef te draaien en vast te houden.

Uw handstuk is nu weer gereed voor gebruik.

## Spare Parts

### Vervangen van het voorste lager

Als u, tijdens het werken met het handstuk, ongewone geluiden opvalt kan dit veroorzaakt worden door een versmeerd of versleten voorste lager. Het lager is beschikbaar al seen individueel onderdeel en kan eenvoudig worden vervangen tijdens het reinigen van het handstuk. Zie ook stap 11 van de reinigingsinstructies